

SET DE PONCTION D'OVOCYTES pour Falcon 50 mL

Aiguille back cut 17 G (diam. 1.4 mm)

CARACTÉRISTIQUES


- Aiguille back cut (biseau arrière) - Talon émoussé.
- 2 zones échogènes **LASER** en extrémité distale de l'aiguille.
- Repère tactile sur l'embase de l'aiguille pour indiquer l'orientation du biseau.
- 2 tubulures fixées à un bouchon en silicone adaptable sur un tube de type Falcon (50 mL).
- Jeu de 4 étiquettes de traçabilité.

UTILISATION

- Ponction folliculaire sous échoguidage en vue d'une fécondation *in vitro*.

RECOMMANDATIONS

- Rincer l'aiguille et la tubulure d'aspiration avec un milieu de culture approprié.
- Adapter un premier tube stérile de type Falcon sur le bouchon (à remplacer en cours de ponction).
- Ponctionner sous pression négative contrôlée (90-100 mm Hg).
- Rincer en fin de ponction (recueil d'éventuels ovocytes dans l'aiguille ou le tube).

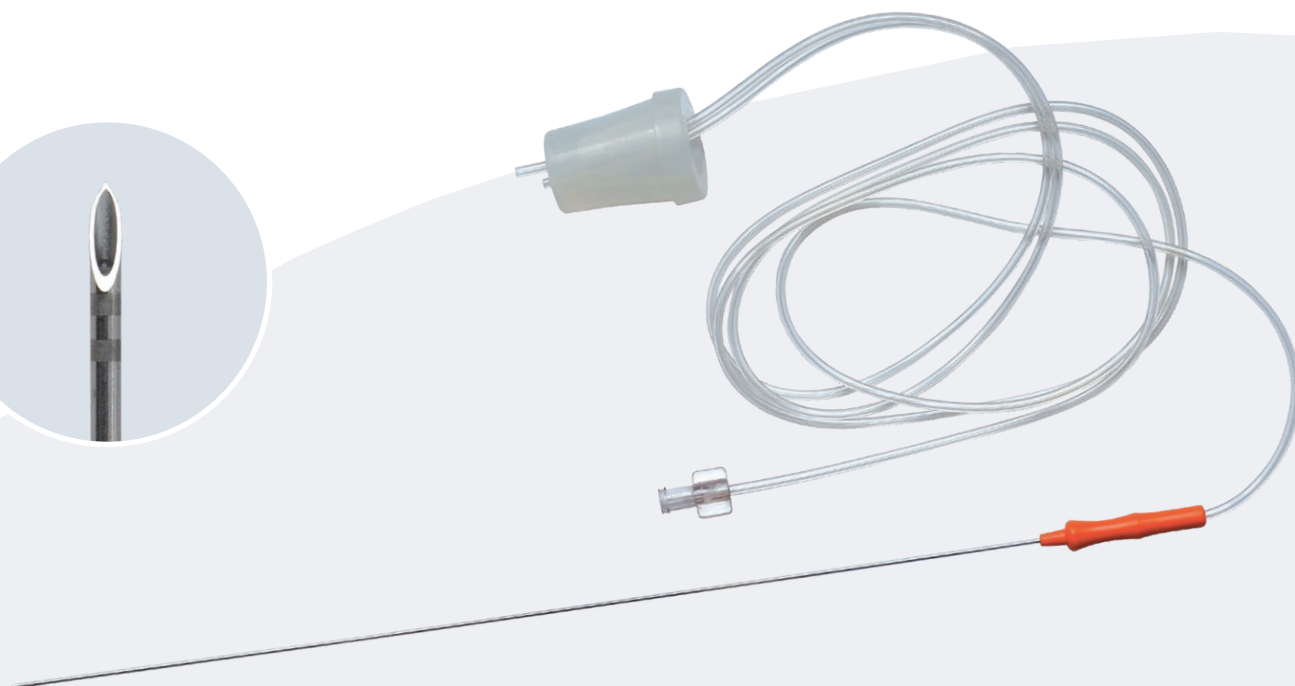

Référence	Désignation	Conditionnement	Dimensions	Stérilisation
EBT00430S-0	Set de ponction d'ovocytes BC 1.4 sans robinet (Falcon 50 mL)	Boîte de 10 unités Sachet individuel double emballage	Aiguille : 30 cm - 17 G (1.4 mm) Tubulure Ø interne : 1.25 mm Aiguille-bouchon : 90 cm Bouchon-pompe : 100 cm	γ irradiation