

SET DE PONCTION D'OVOCYTES pour flacon sv-XL30

Aiguille back cut 17 G (diam. 1.4 mm)

CARACTÉRISTIQUES


- Aiguille back cut (biseau arrière) - Talon émoussé.
- 2 zones échogènes **Laser** en extrémité distale de l'aiguille.
- Repère tactile sur l'embase de l'aiguille pour indiquer l'orientation du biseau.
- 2 tubulures fixées à un bouchon à vis adapté au flacon sv-XL30.
- Tubulures bicouches pour la protection du liquide folliculaire contre les chocs thermiques.
- Jeu de 4 étiquettes de traçabilité.

UTILISATION

- Ponction folliculaire sous échoguidage en vue d'une fécondation in vitro.

RECOMMANDATIONS

- Rincer l'aiguille et la tubulure d'aspiration avec un milieu de culture approprié.
- Adapter un premier flacon sv-XL30 (à remplacer en cours de ponction).
- Ponctionner sous pression négative contrôlée (90 - 100 mm Hg).
- Rincer en fin de ponction (recueil d'éventuels ovocytes dans l'aiguille ou le tube).

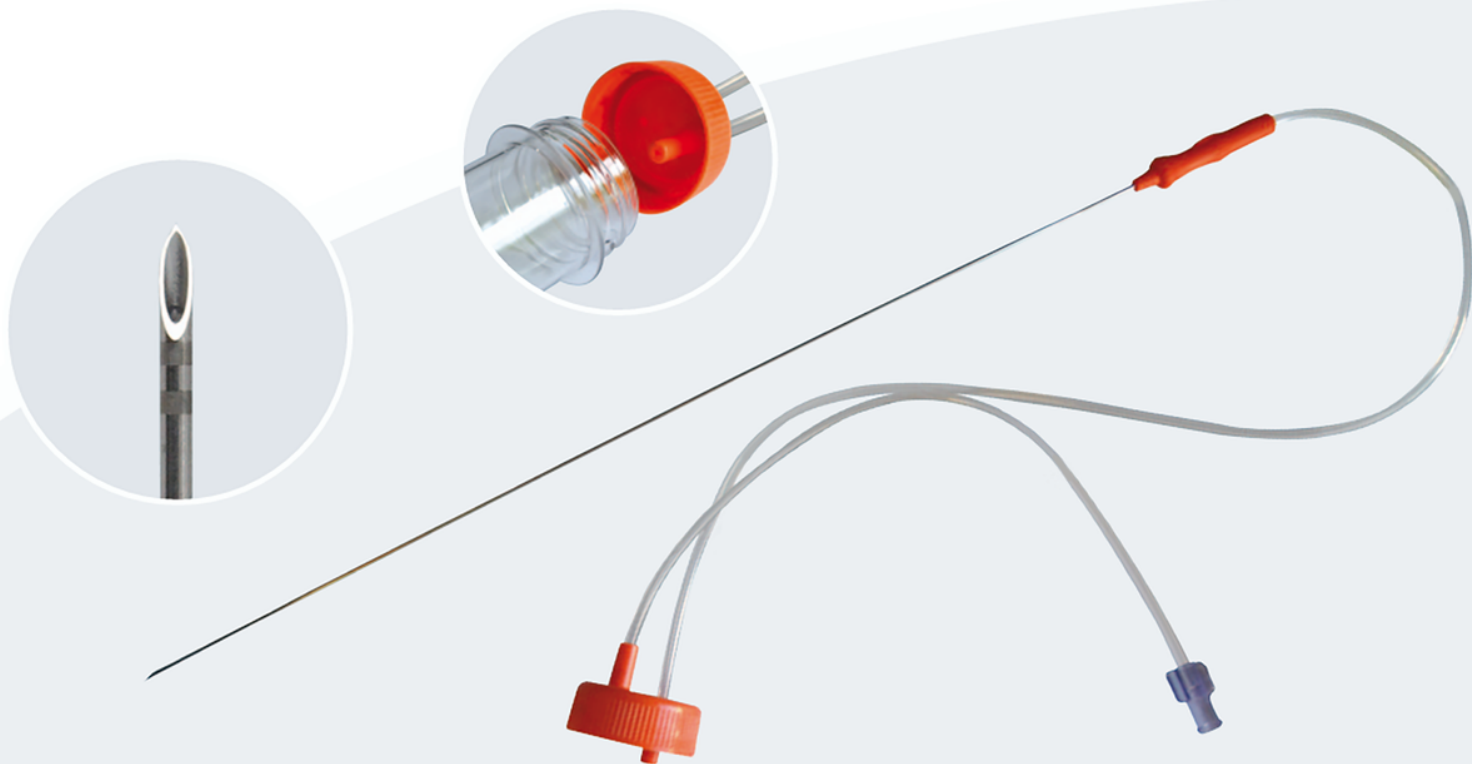

Référence	Désignation	Conditionnement	Longueur	Stérilisation
EBT00330S-0	Set de ponction BC 1.4 flacon sv-XL30	Boîte de 10 unités Sachet individuel double emballage	Aiguille : 30 cm - 17 G (1.4 mm) Tubulure Ø interne : 1.25 mm Aiguille-bouchon : 100 cm Bouchon-pompe : 100 cm	γ irradiation